


Istruzioni per l'installazione del poggiatesta e del ripiano del braccioli



1. Far passare i braccioli tubolari del poggiatesta attraverso gli anelli delle due cinghie del ripiano del bracciolo.



2. Inserire i braccioli tubolari nei fori del poggiatesta del lettino e bloccare la posizione utilizzando la leva di bloccaggio del poggiatesta.

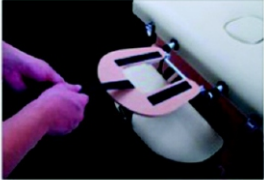

3. Posizionare la cinghia rimanente del ripiano del bracciolo sopra la parte centrale del poggiatesta.



4. Infilare la singola cinghia rimanente attraverso la fibbia.



5. Regolare il ripiano del bracciolo sul posizionamento orizzontale desiderato e stringere tutte le cinghie.



6. Fissare il cuscinello del poggiatesta al poggiatesta con la chiusura in velcro in dotazione.

Usando il tuo poggiatesta regolabile in 6 direzioni

1. Inserire i braccioli tubolari della culla per il viso nelle porte.
2. Posizionare la leva di blocco in modo che si estenda orizzontalmente; con le creste il verso l'alto. (fig. 1)

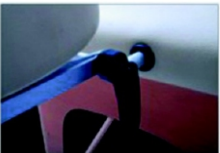


Figura 1



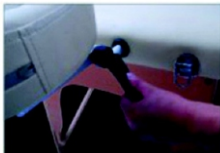


Figura 2

3. Regolare il poggiatesta come desiderato, e poi spostare la leva verso il basso per bloccarlo in posizione. Mantieni il lettino asciutto, ed evitare l'esposizione ad ambienti umidi o bagnati. Se il lettino dovesse bagnarsi, asciugarlo velocemente e completamente con un panno morbido. (fig. 2)

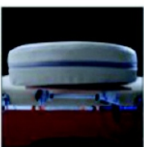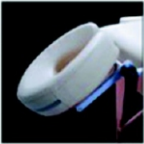

Mantenere il lettino asciutto ed evitare l'esposizione ad ambienti umidi o bagnati. Se il lettino dovesse bagnarsi, asciugare rapidamente e accuratamente con un panno morbido.

3—section Lettino massaggio Regolazione dell'altezza dello schienale

Dopo aver rimosso l'ultima fibbia, puoi alzare lo schienale. Regolare per una posizione desiderata. (fig. 6)

Dopo aver regolato lo schienale all'altezza massima, riposizionare le fibbie. (fig. 7)

Per tutti gli altri usi e le cure, sono uguali come quelli indicati per il lettino massaggio portatile a 2 sezioni. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del lettino massaggio portatile a 2 sezioni.

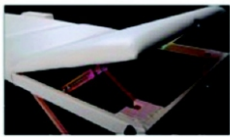


Figura 6

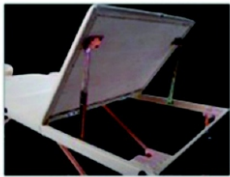


Figura 7

Dichiarazione di non responsabilità

Questo prodotto è destinato esclusivamente ad adulti con esperienza e di età superiore ai 21 anni.

Il venditore non sarà ritenuto responsabile in nessun caso per perdite o danni accidentali o consequenziali, dovuti direttamente o indirettamente all'uso di questo prodotto, incluso qualsiasi malfunzionamento dovuto a negligenza o difetto.

Il venditore non fa affermazioni in merito all'idoneità di questo prodotto per uno scopo o uso specifico.

L'acquirente libera il venditore, i suoi agenti e affiliati da qualsiasi responsabilità derivante da o relativa all'uso o alla proprietà di questo prodotto.

L'acquirente si assume la piena responsabilità e libera il venditore da tutte le responsabilità riguardanti tutte le lesioni personali, le lesioni mortali, la morte dell'utente e di altri, le perdite, i costi e i danni subiti a seguito del funzionamento di questo articolo da parte dell'acquirente o di chiunque altro.

Acquistando questo prodotto, riconosci che hai letto e compreso, e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo e dichiarare di avere l'età legale (21 o più) per sottoscrivere questo Accordo e di essere vincolato dalle sue disposizioni.



Istruzioni per Lettino da Massaggio Portatile

INcha021V01_IT_5550-3291_5550-3282_5550-3293



Lettino ad angolo retto



Lettino in alluminio



Lettino arrotondato



Lettino Multi-Us

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo Lettino da massaggio portatile. Il tuo nuovo lettino è stato sapientemente realizzato secondo standard rigorosi, utilizzando componenti e materiali di alta qualità. Con un uso e una cura adeguati, come indicato in questa guida per l'utente, il tuo lettino dovrebbe fornire prestazioni affidabili di lunga durata. Per garantire un uso sicuro e corretto del tuo lettino, ti preghiamo di dedicare un momento alla lettura completa di questa guida prima di utilizzare il tuo lettino.

ISTRUZIONI PRECAUZIONALI

- Eseguire la manutenzione periodicamente. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate e che il cavo non sia deteriorato o sfilacciato. Assicurarsi che non ci siano crepe nella struttura in legno
- Non sovraccaricare il lettino oltre il limite di peso consigliato, il che potrebbe causare gravi lesioni all'utente.
- Non utilizzare detergenti a base di alcol durante la pulizia dei materiali vinilici. Ciò potrebbe causare danni ai materiali vinilici. Usare acqua calda e sapone e asciugare.
- Durante l'utilizzo del lettino, assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano su una superficie solida e allo stesso livello.

MONTARE IL LETTINO

Appoggiare il lettino su un fianco, sganciare le fibbie, aprire parzialmente il lettino e rimuovere gli accessori. (fig. 1)



Figura 1



Figura 2

Stare in piedi dietro il lettino, afferrare entrambe le maniglie del lettino e spingere delicatamente verso l'esterno per aprire completamente il letto. Le gambe si aprono automaticamente (fig. 2)

Girare il lettino in posizione verticale sollevando il centro del lettino. Premere al centro del lettino per assicurarsi che il lettino sia ben piatto. Se il lettino punta in mezzo, controllare e raddrizzare il cavo.

UTILIZZO DEL LETTINO E DEGLI ACCESSORI

Forniamo accessori opzionali per te. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Poggiatesta:

Il poggiatesta è costituito da una base del poggiatesta a mezzaluna e un cuscinello per il viso a mezzaluna. Darà al tuo cliente un comodo supporto per la testa e il viso. Potresti avere un'opzione diversa per la base del poggiatesta. Il poggiatesta regolabile è facile da cambiare. Modificare l'angolo e l'altezza della base regolando la maniglia della base. (figura 3)

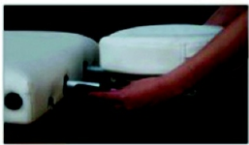


Figura 3

Ripiano bracciolo regolabile:

Il ripiano bracciolo regolabile è un buon dispositivo per sostenere le braccia del tuo cliente nella parte anteriore del lettino. Appendere il ripiano del bracciolo alle due barre del poggiatesta e far scorrere la cinghia verso l'alto o verso il basso per ottenere la posizione ottimale. (figura 4)



Figura 4

Estensione del bracciolo laterale:

Questa è l'estensione del bracciolo laterale per il nostro lettino. Questi braccioli laterali imbottiti rimovibili aggiungono larghezza al lettino. Si inseriscono nei fori accessori richiesti su ciascun lato del lettino. Questo darà un comodo supporto per le braccia, specialmente per un cliente con corpo massiccio.

Regolazione altezza:

L'altezza corretta del lettino è determinata dall'altezza, dalla modalità e dalla tecnica del terapeuta. È possibile regolare l'altezza rimuovendo la manopola dell'impugnatura da ciascuna gamba. Riposizionare le manopole dopo aver regolato ciascuna gamba nella posizione desiderata.

Limiti di peso per il Lettino:

Posizionare il cliente al centro del lettino aiuterà a distribuire il peso in modo uniforme e garantire la stabilità. Siediti delicatamente vicino (non sopra) al centro del lettino, e poi siediti il più vicino possibile al centro (dal bordo). Il peso di lavoro è il peso combinato del cliente e la quantità massima di pressione verso il basso applicata dal terapeuta. Il peso massimo di lavoro per il lettino è di 500 libbre. Ad esempio: per un cliente che pesa 300 libbre, la pressione massima verso il basso che può essere applicata in sicurezza è di 200 libbre. Visto che la pressione applicata lateralmente sottopone una pressione notevole al lettino, la pressione laterale massima non deve superare il 50% della pressione massima verso il basso.

NON SUPERARE IL PESO MASSIMO DI LAVORO RIFERITO.

(Non superare mai i limiti di peso del lettino; ciò potrebbe causare gravi lesioni e/o danni.)

Conservazione:

Fissare la base del poggiatesta e il cuscinello per il viso sull'elastico sotto il lettino come mostrato. Posizionare ogni accessorio nella sua posizione originale. (figura 5)



Figura 5

La custodia per il trasporto deve essere utilizzata durante il trasporto o la conservazione del lettino per proteggere il lettino da eventuali danni. Quando non viene utilizzato, conservare il lettino in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta. Non esporre il lettino a temperature estreme (calde o fredde) o umidità.



Enjoy better life