

figura 1

Step 1: Aprire la confezione, assemblare tutte le parti come in figura.

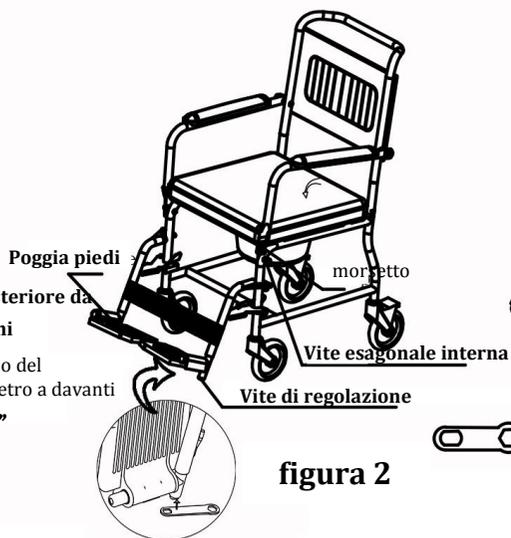



figura 2

Step 2 : Estendere verso il basso i tubi del poggia braccia come indicato dalla freccia, assicurarsi che il morsetto sia fissato con la vite esagonale interna, poi regolare l'altezza del poggia piedi come desiderato.



figura 3


Step 3: Per la vostra sicurezza, bloccare la route posteriori prima dell'uso, ripiegare il poggia piedi e allentare il freno solo dopo esservi seduti

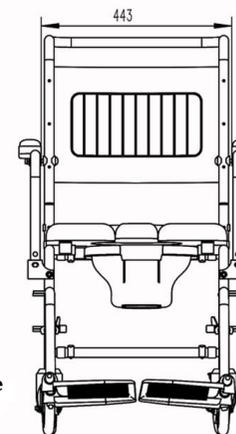

Dopo aver rimosso la fodera, il prodotto può essere utilizzato sul water. Sono disponibili dimensioni del telo uguali o inferiori a L39xw38xH33 cm.

Sicurezza e manutenzione:

1. Assicurarsi che tutte le viti siano strette in sicurezza e che il telaio sia stabile prima di usare questo prodotto. Il peso dell'utente non deve superare 1130 kg.
2. Lubrificare i cardini con regolarità per allungare il ciclo di vita del prodotto.
3. Questo dispositivo va pulito e disinfettato ad intervalli regolari, e va posizionato in un luogo fresco

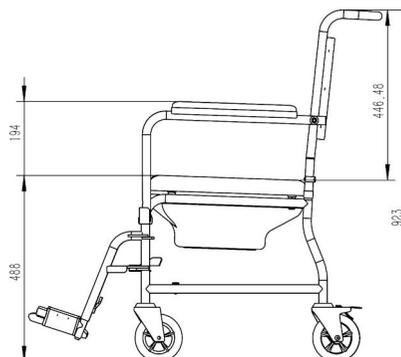

9	Chiave	1
8	Cintura poggipiedi	1
7	Tubo support poggia braccia	2
6	secchio	1
5	Poggia piedi	2 (destryo e sinistro)
4	telaio	1
3	sedile	1
2	bulloni	2
1	schienale	1
NO.	Nome parte	Quantita'

