

1

1. Bitte befestigen Sie das Paket mit H und entfernen Sie den Gummistopfen von 1.




2

2. Setzen Sie die Armlehne in Position 1 ein.




3

Bitte sichern Sie die Handgriffe mit dem Schraubband C

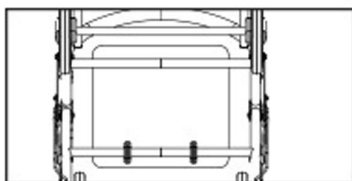

4

4. Bitte befestigen Sie die Schrauben von A und G mit Hilfe von Werkzeugen am Gelenk von E.

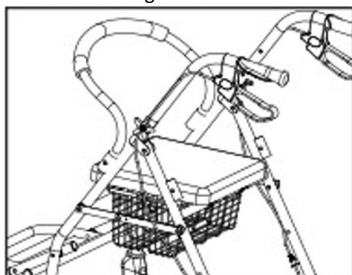

5. Setzen Sie das Rückenrohr ein und achten Sie darauf, dass die Murmeln aus dem Schraubenloch kommen.



6. Nun ist die Installation abgeschlossen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Bremse und alle Schrauben und Verbindungselemente ordnungsgemäß befestigt sind. Bitte achten Sie bei der Verwendung des Produkts auf Ihre Sicherheit.

