


## Toilettensitz Montageanleitung

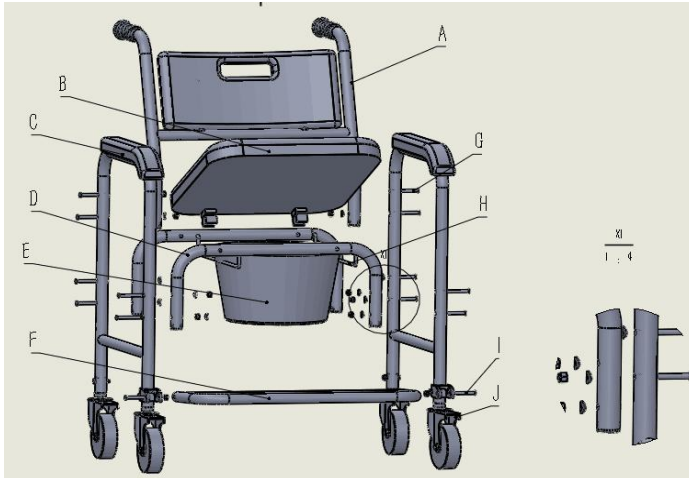

- A. Handgriffe 1x Stk.
- B. Kissen 1x Stk
- C. Armlablage 2x Stk.
- D. Stützrohr 2x Stk
- E. Toilette 1x Stk
- F. Stützfußgestell 1x Stk
- G. Schraube M6 x 55 12 Stk
- H. WC Stützrohr 2x Stk.
- I. Schraube M6 x 40 2x Stk
- J. Bremse 4x Stk

### HINWEIS:

1. Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben.
2. Bitte achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
3. Dieses Produkt ist mit vier Rädern (J) und einer Bremse zum Anhalten ausgestattet.

**1. Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile geliefert wurden.**




**2. Richten Sie die Löcher mit den Schrauben (G) aus. Bitte achten Sie auf die Rohröffnung (D).**

**3. Das Rohr (H) gemäß dem obigen Bild installieren.**

**4. Befestigen Sie das Stützrohr (D) am Toilettenstützrohr (H) und befestigen Sie es mit den Schrauben (G).**

**5. Befestigen Sie den Stützfußhalter (F) und ziehen Sie ihn mit den Schrauben (I) fest**

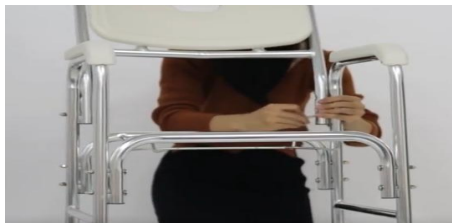

**6. Befestigen Sie die Handgriffe (A) mit Hilfe eines Werkzeugs und ziehen Sie sie fest.**

**7. Setzen Sie die Toilette (E) ein und sichern Sie sie mit dem Toilettenstützrohr (H).**

**8. Setzen Sie das Kissen (B) ein und gehen Sie sicher, dass das Stützrohr (D) eingeklemmt ist.**

