





**Maximale Belastung: 135 kg**

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

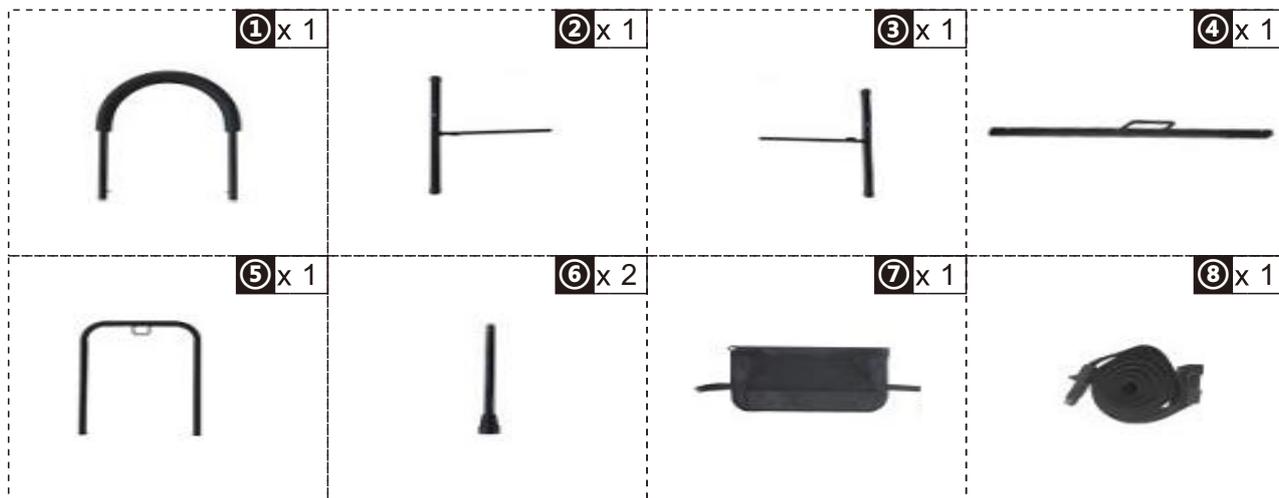


**01**

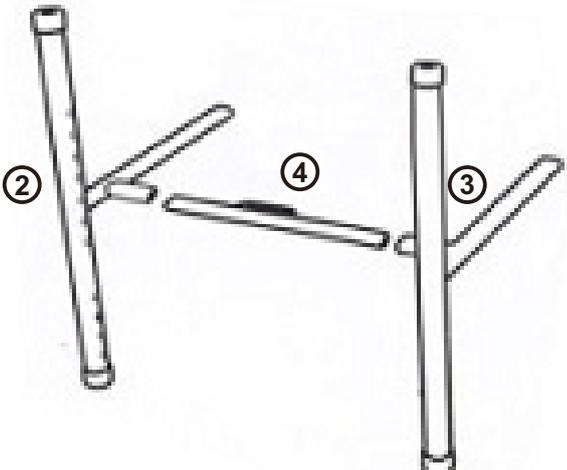


Verwenden Sie Teil ④, um Teil ② und Teil ③ zu verbinden, stellen Sie sicher, dass der Verschluss in der Bohröffnung befestigt ist.

**02**

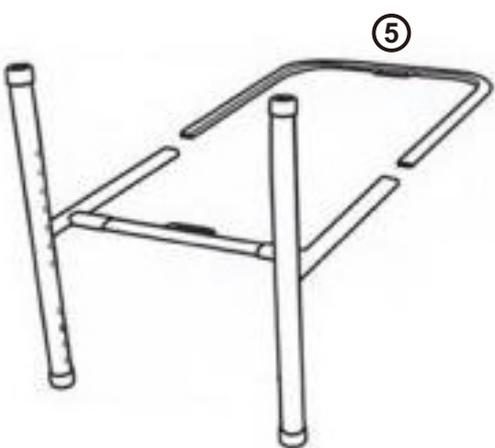

Verbinden Sie die Teile 2 und 3 anhand der Teile 5. Achten Sie darauf, dass der Verschluss in der Bohröffnung befestigt ist.

**03**

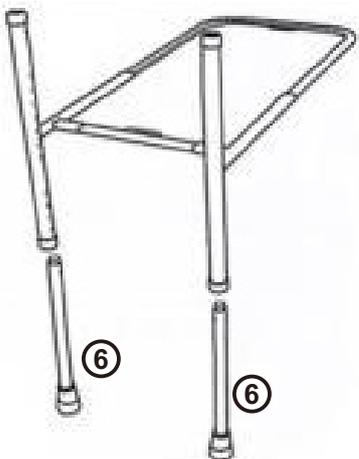

Verbinden Sie die Rohre mit dem Verbindungstück 2. Achten Sie dabei auf die richtige Höhe und stellen Sie sicher, dass die beiden Rohre auf der gleichen horizontalen Linie liegen.

**04**



Montieren Sie die Handgeländer und vergewissern Sie sich, dass der Verschluss im Rohr eingerastet ist und die richtige Höhe eingestellt ist.

05



Hängen Sie die Tasche auf und befestigen Sie den Klettverschluss am linken und rechten Rohr (**Packen Sie nicht mehr als 5 kg**)

06



Legen Sie den Schlauch unter die Matratze und wickeln Sie das Seil um die Matratze. Sichern und befestigen Sie das Seil an der Matratze.



## Warnung:

- ①: Prüfen Sie bitte vor der Montage, ob die Verbindungsstücke vollständig sind
- ②: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Befestigungselemente ordnungsgemäß montiert und angezogen sind und dass sich die Klammern auf gleicher Höhe befinden
- ③: Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass Sie in einem stabilen Zustand arbeiten
- ④: Bitte achten Sie bei der Benutzung auf die Sicherheit, ggf. lassen Sie sich vom Pflegepersonal bei der Verwendung unterstützen
- ⑤: Überprüfen Sie bei jedem Gebrauch sorgfältig, ob der Verschluss locker ist, die Abnutzung des Pads, tauschen Sie es ggf. rechtzeitig aus

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it